

퀵가이드

래피젠

자세한 방법은 뒷 페이지의 사용방법을 참고하세요

1 검사전 준비



1 코 풀기



2 손 씻기




3 장갑 착용(미제공)

2 검체추출액



1 덮개 제거

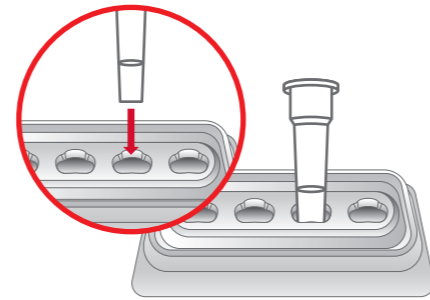


2 튜브 고정 홈에 장착


3 면봉



1 면봉 꺼내기

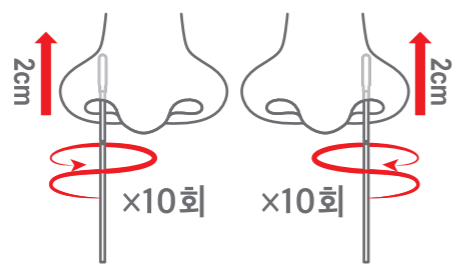

2 양쪽 코 검체 채취

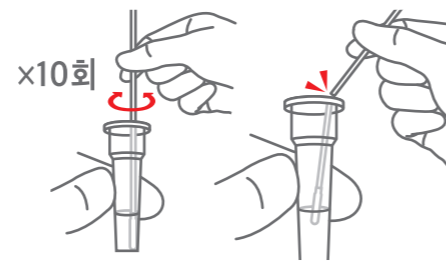


3 추출 및 부러뜨리기

4 필터마개



1 필터마개 장착

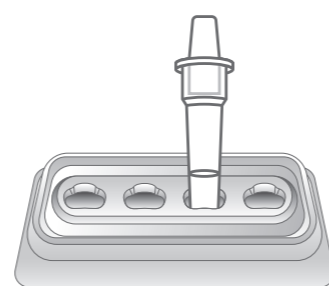


2 튜브 고정 홈에 장착

5 테스트기



1 테스트기 꺼내기

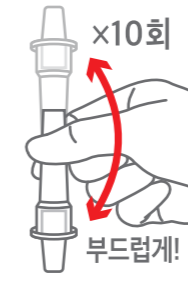


2 검체 섞기



테스트기를 기울이거나 검사면에 두고 사용하지 마세요

* 테스트기를 평평한 곳에 놓아둡니다.

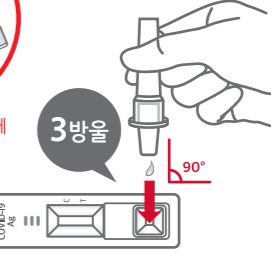


3 점적




15분에서 30분 이내에 결과를 판독합니다.

6 폐기처리


* 의료기관의 경우 검사에 결과에 상관없이 사용된 물품은 의료폐기물 규정에 따라 폐기

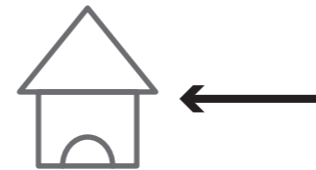

대조선 (C라인)만 나타난 경우 가정용 쓰레기통에 버림

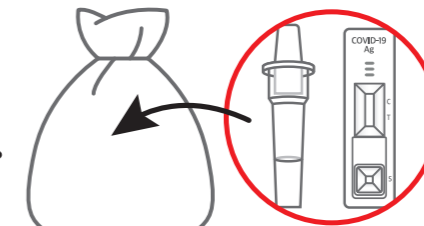

검사에 사용한 구성품을 폐기용 비닐봉투에 넣기

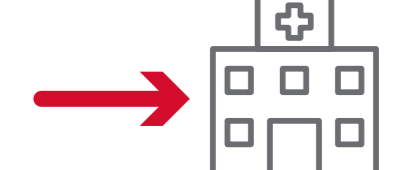


대조선 (C라인)과 시험선 (T라인)이 모두 나타난 경우 선별 진료소에 방문하여 폐기 요청

결과판정


대조선 (C라인)만 나타난 경우



대조선 (C라인)과 시험선 (T라인)이 모두 나타난 경우

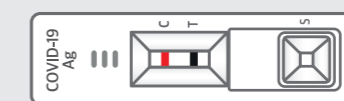


무 효

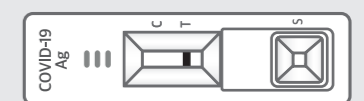

시험선 (T라인) 밴드 진하기

검출하는 항원량에 따라 시험선 (T 라인)은 다양한 진하기로 나타나며 선이 희미하더라도 존재하는 것으로 판단합니다.

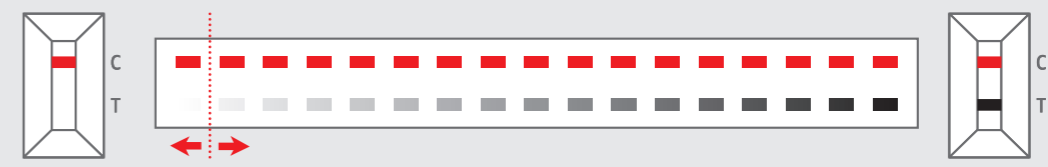

대조선 (C라인)만 나타난 경우

* 대조선 (C라인)과 시험선 (T라인)이 모두 나타난 경우