

1 검사전 준비



【사용방법 동영상】



1 코 풀기

×3회



2 손 씻기



3 장갑 착용(미제공)

5 테스트기



1 테스트기 꺼내기



2 검체 섞기


×10회

부드럽게!



테스트기를 기울이거나 검사면에 두고 사용하지 마세요

* 테스트기를 평평한 곳에 놓아둡니다.

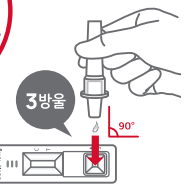

3방울

3 점적



15분에서 30분 이내에 결과를 판독합니다.


4 결과 확인

2 검체추출액



1 덮개 제거

TIP! 파우치 뒷면의 접는 방법을 참고하세요

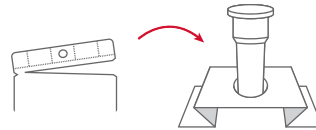


파우치 윗 부분을 뜯은 후 접어주세요. 검체추출액을 고정 흡에 끼워 사용하세요.

6 폐기처리



대조선 (C라인)만 나타난 경우 가정용 쓰레기통에 버림

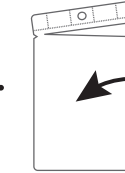

폐기를 위해 사용한 구성품을 제품 포장지 또는 폐기용 비닐봉투에 넣으세요.



대조선 (C라인)과 시험선 (T라인)이 모두 나타난 경우 선별 진료소에 방문하여 폐기 요청 * 가정용 쓰레기통에 버리지 마십시오.

3 면봉




1 면봉 꺼내기



2 양쪽 코 검체 채취

양쪽 10회

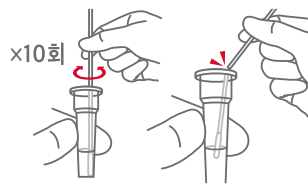


3 추출 및 부러뜨리기

×10회

4 필터마개



1 필터마개 장착

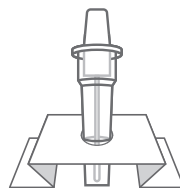

2 튜브 고정 흡에 장착

결과판정

대조선 (C라인)만 나타난 경우



대조선 (C라인)과 시험선 (T라인)이 모두 나타난 경우



무효




시험선 (T라인) 밴드 진하기

검출하는 항원량에 따라 시험선 (T 라인)은 다양한 진하기로 나타나며 선이 희미하더라도 존재하는 것으로 판단합니다.



대조선 (C라인)만 나타난 경우

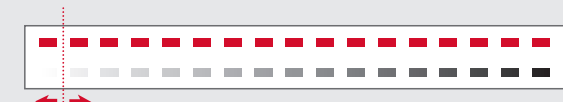

* 대조선 (C라인)과 시험선 (T라인)이 모두 나타난 경우

